



Egylépéses Ultraérzékeny Terhességi Teszt (Középsugarú Vizeletből) Használati Utasítás


REF FHC-U103 magyar

Önellőrzésre

ELV

A terhesség korai, gyors, egyszerű kimutatására szolgáló teszt. A tokjából kivett teszt a vizeletsugárba tartva nedvesedik a vizelettel. A terhességet jelző humán chorion gonadotropin (hCG) hormon kvalitatív kimutatása immunkromatográfias módszerrel történik. A terhesség alatt a hCG koncentrációja emelkedik, amelynek szelektív kimutatását teszi lehetővé a teszt, antitestek kombinációján keresztül. A teszten lévő kromatográfias lapon megjelenő színes csíkok jelzik a terhességet.

FIGYELMEZTETÉSEK

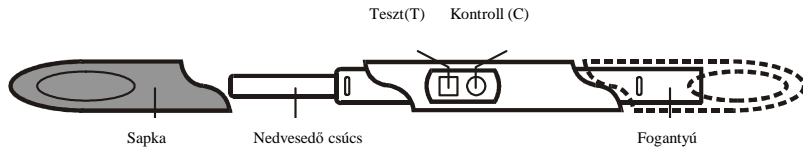

A vizsgálat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a Használati Utasítást!

- Ne használja a tesztet a műanyag csomagoláson feltüntetett lejárati idő után!
- A tesztet száraz helyen, 2-30°C hőmérsékleten tárolja! Ne fagyassza le!
- Ne használja a tesztet, ha a műanyag csomagolás nedves, vagy sérült!
- Tartsa gyermekektől elzárva!
- Csak *in vitro* diagnosztikai célra használható! Belsőleg nem használható!
- Ne nyissa fel a műanyag csomagolást, amíg fel nem készült a vizsgálatra!

TARTALOM

- Teszt, középsugarú vizelet vizsgálatához

- Használati Utasítás

KIVITELEZÉS

1. Vegye ki a tesztet a műanyag csomagolásból és ismerkedjen a termékkel.
2. Távolítsa el a sapkát és helyezze a fogantyúra (lásd a felső ábrát).
3. Tartsa a tesztet fogantyúnál fogva, a szabadon lévő **nedvesedő csúccsal lefelé közvetlenül a vizelet sugárba, legalább 10 másodpercig, amíg megfelelően nedvesedik! Figyelem! Óvjuk a vizelettől a Teszt és a Kontroll ablakokat.** Vizeletmintát is vehet, tiszta, száraz edénybe, ekkor a nedvesítő csíkot mártsa a vizeletbe 10 másodpercig.
4. A vizeletsugárból, vagy a vizeletpohárból kiemelt nedvesített csúcsra azonnal helyezze vissza a **sapkát** és tegye vízszintes helyre a tesztet, a teszt (T) és kontroll ablakkal (C) felfelé, majd kezdje meg az időmérést.
5. Ahogy a teszt működni kezd, egy halvány elszíneződést figyelhet meg, ahogy a vizelet áthalad a teszt (T) és a kontroll ablakon (C).

3 perc múlva olvassa le az eredményt!

Ha a hCG koncentráció magas, a színes csík 1 percen belül is megjelenhet. Ha nincs színes csík 3 perc múlva, várjon még 1 percet, de 10 perc múlva az eredmény nem már értékelhető.



ÉRTÉKELÉS



TERHES: Két elkülönítő csík jelenik meg. Az egyik a kontroll ablakban (C), a másik a teszt ablakban (T) jelenik meg. Az egyik csík lehet halványabb, mint a másik. Ezt nem kell figyelembe venni. A pozitív eredmény a terhességet valószínűsíti.



NEM TERHES: Egy színes csík jelenik meg a kontroll ablakban (C). A teszt ablakban (T) nem jelenik meg a csík. A negatív eredmény valószínűsíti, hogy nem terhes.

NEM ÉRTÉKELHETŐ: Ha nem jelenik meg színes csík a kontroll ablakban (C), még akkor sem, ha a teszt ablakban (T) megjelenik egy csík. A vizsgálatot meg kell ismételni egy új középsugarú teszttel.

TESZT HASZNÁLATÁNAK KORLÁTAI

Előfordulhat, hogy a teszt téves eredményt ad. Beszélje meg orvosával, mielőtt bármilyen beavatkozásra dönt.

1. Téves pozitív eredményt okozhatnak hCG tartalmú gyógyszerek (Pregnyl, Profasi, Pergonal és APL). Alkohol, fogamzásgátlók, fájdalomcsillapítók, antibiotikumok és hormonok, amelyek nem tartalmaznak hCG-t, nem befolyásolják az eredményt.
2. Néhány terhességtől különböző állapot, mint petefészek ciszta, vagy méhen kívüli terhesség szintén magasabb hCG szintet, ezzel téves pozitív eredményt okoz.

KÉRDÉSEK (K) ÉS VÁLASZOK (V)

1. **K: Hogyan működik a teszt?**
V: Az egylépéses teszt azt a hormont (hCG) mutatja ki a vizeletből, amelyet a terhes nő szervezete termel. A terhességi hormon koncentrációja a terhesség idejével nő.
2. **K: A terhesség gyanúja után mikor használható a teszt?**
V: A teszt a menstruáció elmaradása után az első nap felhasználható. A teszt a nap folyamán bármikor használható, azonban a reggeli vizelet tartalmazza a legtöbb hormont.
3. **K: Elvégezhető-e vizsgálat első reggeli vizeletből?**
V: Bár a teszt bármikor elvégezhető a nap folyamán, de mivel a reggeli vizelet tartalmazza a legtöbb hormont, a reggeli idő a legmegfelelőbb.
4. **K: Mennyire megbízható a vizsgálat?**
V: Összehasonlító klinikai vizsgálatokat végeztek ezzel a teszttel és más kereskedelmi forgalomban kapható immunológiai teszttel. Az összehasonlításra 70 vizeletmintát használtak, melyből 27 pozitív és 43 negatív minta volt. Az eredmények > 99,0 %-nál nagyobb megbízhatóságot mutattak.
5. **K: Mennyire érzékeny a teszt?**
V: A teszt érzékenysége 10 mIU/ml, vagy nagyobb. A tesztet a W.H.O. Third International Standard előírásai szerint vizsgálták. A teszt eredményét nem befolyásolja más hormonok hatása LH (300 mIU/ml), FSH (1000 mIU/ml) és TSH (1000 mIU/ml), 0 mIU/ml, (negatív), illetve 10 mIU/ml (pozitív) hCG tartalmú minták esetén.
6. **K: Mit tegyek, ha az eredmény terhességre utal?**
V: Ez azt jelenti, hogy Ön valószínű terhes, mivel vizeletében hCG mutatható ki. Keresse fel orvosát és beszélje meg a további teendőket.
7. **K: Honnan tudom, hogy a teszt jól működött?**
V: A kontroll ablakban (C) megjelenő színes csík mutatja Önnek, hogy a teszt jól működött és az előírás szerint végezte a vizsgálatot.
8. **K: Mit tegyek, ha az eredmény nem utal terhességre?**
V: Ez azt jelenti, hogy a vizeletben hCG hormont nem mutatható ki, ami valószínűsíti, hogy Ön nem terhes. Ha a ciklusa a szokásos időpont után egy héttel sem kezdődik, ismételje meg a vizsgálatot egy új teszt felhasználásával. Ha ismét negatív az eredmény, és a ciklusa nem kezdődött meg, keresse fel orvosát.

Kérjük, tartsa be a következőket, hogy növekedjen az egészséges terhesség és az egészséges újszülött esélye!

1. Ha késik a ciklusa, használja ezt a tesztet.
2. Pozitív eredmény esetén azonnal keresse fel orvosát, hogy a terhes gondozás megkezdődhessen.
3. Tartson kiegyensúlyozott diétát, ne dohányozzon és csökkentse a szeszitalok fogyasztását.

Csomagoláson alkalmazott jelölések

	Figyelmeztetés Használati Utasításra
	Csak <i>in vitro</i> használatra
	Tárolási hőmérséklet 2-30°C

	Csomagolási darabszám
	Felhasználhatóság ideje
	Gyári szám

	Gyártó cég
	Csak egyszeri használatra
	Katalógus szám



ACON Laboratories, Inc.
4108 Sorrento Valley Boulevard,
San Diego, CA 92121, USA



acc.to IVDD 98/79/EC
MDSS
Burkhardtstr. 1
30163 Hannover, Germany
Sorszám: R0151255-01
Készült: 2003-12-01

Importálja/Forgalmazza: VITANI Kft
Telefon: 467-0767

1147. Budapest, Telepes u. 17. www.vitani.hu
Telefon/Fax/Üzenetrögzítő: 467-0768 E mail: vitani.kft@vitani.hu