

A vizsgálat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a Használati Utasítást!

ELV

A terhesség korai, gyors, egyszeri kimutatására szolgáló tesztcsík. A tesztcsík vizeletmintába történő mártásával a terhességet jelző humán chorion gonadotropin (hCG) hormon kvalitatív kimutatása történik. Az immunkromatográfiás módszer lehetővé teszi az antitestek kombinációján keresztül a megemelkedett humán chorion gonadotropin (hCG) hormon szelektív kimutatását. A tesztcsíkon megjelenő színes csíkok jelzik a terhességet.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a tesztet a fóliacsomagoláson feltüntetett lejárati idő után!
- A tesztet száraz helyen, 2-30°C hőmérsékleten tárolja! Ne fagyassza le!
- Ne használja a tesztet, ha a műanyagfólia-csomagolás nedves, vagy sérült!
- Tartsa gyermekektől elzárva!
- Csak in vitro diagnosztikai célra használható! Belsőleg nem használható!
- Ne nyissa fel a műanyag csomagolást, amíg fel nem készült a vizsgálatra!


TARTALOM

Tesztcsík, Használati Utasítás

KIVITELEZÉS

1. Vegyen vizeletmintát tiszta, száraz edénybe.
2. Vegye ki a tesztet a műanyag csomagolásból és ismerkedjen a termékkel.
3. Függőlegesen tartva a nyílak irányában mérítse a tesztcsíkot a vizeletmintába 10-15 másodpercig. Ne merítse a tesztcsíkot a MAX jelzésnél mélyebbre!
4. Vegye ki a tesztcsíkot a vizeletmintából, helyezze a jelzésekkel felfelé jól megvilágított, nem nedvszívó vízszintes felületre, és kezdje meg az időmérést.
5. Ahogy a teszt működni kezd, egy halvány elszíneződést figyelhet meg, ahogy a vizelet áthalad a teszt (T) és a kontroll zónában (C).
6. Olvassa le az eredményt 3 perc múlva. Ha a hCG koncentráció magas, a színes csík 1 percen belül is megjelenhet. Ha nincs színes csík 3 perc múlva, várjon még 1 percet, de 10 perc múlva az eredmény már nem értékelhető.

ÉRTÉKELÉS

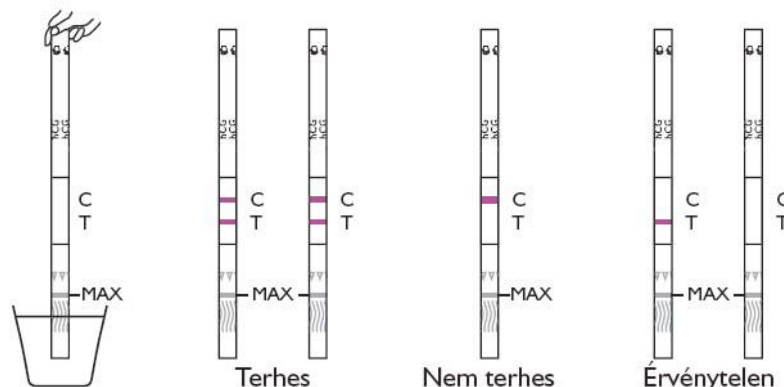

TERHES:

Két elkülönülő csík jelenik meg. Az egyik a kontroll zónában (C), a másik a teszt zónában (T) jelenik meg. Az egyik csík lehet halványabb, mint a másik. Ezt nem kell figyelembe venni. A pozitív eredmény a terhességet valószínűsíti.

NEM TERHES:

Egy színes csík jelenik meg a kontroll zónában (C). A teszt zónában (T) nem jelenik meg csík. A negatív eredmény valószínűsíti, hogy nem terhes.

NEM ÉRTÉKELHETŐ:

Ha nem jelenik meg színes csík a kontroll zónában (C), még akkor sem, ha a teszt zónában (T) megjelenik egy csík. A vizsgálatot meg kell ismételni egy új tesztel.

TESZT HASZNÁLATÁNAK KORLÁTAI

Előfordulhat, hogy a teszt téves eredményt ad. Beszélje meg orvosával, mielőtt bármilyen beavatkozásról dönt. Téves pozitív eredményt okozhatnak hCG tartalmú gyógyszerek (Pregnyl, Profasi, Pergonal és APL). Alkohol, fogamzásgátlók, fájdalomcsillapítók, antibiotikumok és hormonok, amelyek nem tartalmazzak hCG-t, nem befolyásolják az eredményt.

Néhány terhességtől különböző állapot, mint petefészkek ciszta, vagy méhen kívüli terhesség szintén magasabb hCG szintet, ezzel téves pozitív eredményt okoz.

KÉRDÉSEK (K) ÉS VÁLASZOK (V)

K: Hogyan működik a teszt?

V: Az egylépéses teszt azt a hormont (hCG) mutatja ki a vizeletből, amelyet a terhes nő szervezete termel. A terhességi hormon koncentrációja a terhesség idejével nő.

K: A terhesség gyanúja után mikor használható a teszt?

V: A teszt a menstruáció elmaradása után az első nap felhasználható. A teszt a nap folyamán bármikor használható, azonban a reggeli vizelet tartalmazza a legtöbb hormont.

K: Elvégezhető-e vizsgálat első reggeli vizeletből?

V: Bár a teszt bármikor elvégezhető a nap folyamán, de mivel a reggeli vizelet tartalmazza a legtöbb hormont, a reggeli idő a legmegfelelőbb.

K: Mennyire megbízható a vizsgálat?

V: Összehasonlító klinikai vizsgálatokat végeztek ezzel a teszttel és más kereskedelmi forgalomban kapható immunológiai teszttel. Az összehasonlításra 70 vizeletmintát használtak, melyből 30 pozitív és 40 negatív minta volt. Az eredmények 99%-nál nagyobb megbízhatóságot mutattak.

K: Mennyire érzékeny a teszt?

V: A teszt érzékenysége 10 mIU/ml, vagy nagyobb. A tesztet a W.H.O. Third International Standard előírásai szerint vizsgálták. A teszt eredményét nem befolyásolja más hormonok hatása LH (300 mIU/ml), FSH (1000 mIU/ml) és TSH (1000 μ IU/ml), 0 mIU/ml (negatív), illetve 10 mIU/ml (pozitív) hCG tartalmú minták esetén.

K: Mit tegyek, ha az eredmény terhességre utal?

V: Ez azt jelenti, hogy Ön valószínű terhes, mivel vizeletében hCG mutatható ki. Keresse fel orvosát és beszélje meg a további teendőket.

K: Honnan tudom, hogy a teszt jól működött?










V: A kontroll (C) ablakban megjelenő színes csík mutatja Önnek, hogy a teszt jól működött és az előírás szerint végezte a vizsgálatot.

K: Mit tegyek, ha az eredmény nem utal terhességre?

V: Ez azt jelenti, hogy a vizeletben hCG hormon nem mutatható ki, ami valószínűsíti, hogy Ön nem terhes. Ha a ciklusa a szokásos időpont után egy héttel sem kezdődik, ismétlje meg a vizsgálatot egy új teszt felhasználásával. Ha ismét negatív az eredmény, és a ciklusa nem kezdődött meg, keresse fel orvosát.

Kérjük, tartsa be a következőket, hogy növekedjen az egészséges terhesség és az egészséges újszülött esélye!

1. Ha késik a ciklusa, használja ezt a tesztet!
2. Pozitív eredmény esetén azonnal keresse fel orvosát, hogy a terhes-gondozás megkezdődhessen.
3. Tartson kiegyensúlyozott diétát, ne dohányozzon és csökkentse a szeszesitalok fogyasztását!

Csomagoláson alkalmazott jelölések	
	Figyelmeztetés Használati Utasításra
	Csak <i>in vitro</i> használatra
	Tárolási hőmérséklet 2-30°C
	Csomagolási darabszám
	Felhasználhatóság ideje
	Gyári szám
	Gyártó cég
	Csak egyszeri használatra
	Katalógus szám



Innovacon Inc.
4108 Sorrento Valley Boulevard,
San Diego, CA 92121, USA



„Auth Rep”
acc. IVDD 98/79/EC
MDSS
Burckhardtstr. 1
30163 Hannover, Germany

Sorszám: RO151253-01
Készült: 2003-12-01

Importálja/Forgalmazza
VITANI Kft.

1147 Budapest, Telepes utca 17.